


耳あな型補聴器 メディカルリスニングプラグ



聴力チェックや聴力に合わせた聞こえ具合の調整からアフターサービスまで、**オンライン**で対応しています



購入から60日間は何回でも補聴器の調整ができます。オプションの「ケアプラン」にご加入いただくと、さらに1年間のフィッティングサポート延長に加え、5年間の延長保証や盗難・紛失補償などが受けられます。

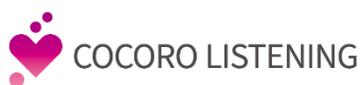

ケアプラン

5年

延長保証 ※
(メーカー保証1年間含む)

5年

盗難・紛失補償 ※

1年

リモートフィットサービス
(追加)




※自己負担金が必要です。



リモートフィットサービス (追加)

60日

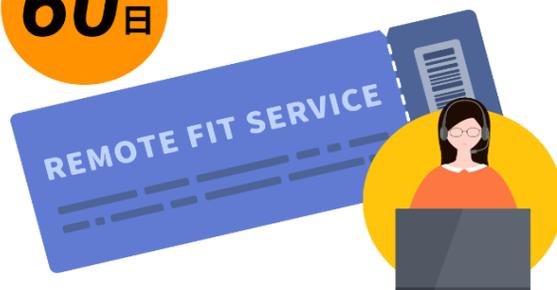

【ご購入後、ご利用開始までの手順について】

STEP 1 アプリのダウンロード

右のQRコードを読み取って「COCORO LISTENING」アプリをダウンロードし、アプリを起動してください



STEP 2 COCORO MEMBERSにログイン

画面の指示に従ってCOCORO MEMBERSにログインしてください
IDをお持ちでない方は新規登録を行った後、ログインしてください

STEP 3 本体接続

本体を充電ケースから取り出して、スマートフォンとBluetoothで接続します

STEP 4 シリアル番号の登録

アプリに戻り、本体接続の「シリアル番号登録」の画面の案内に従って、本体の「シリアル番号」を選択し、登録してください

STEP 5 聴力チェックの準備

周囲の雑音を防ぎ、チェック音が音漏れしないように装着できる一番大きいサイズのイヤチップを選んで付け替えてください

STEP 6 パーソナライズ：聴力チェック

アプリに戻り、右下の「フィッティング」→「パーソナライズ」を押し、お客様情報を入力した後、聴力チェックに進みます

STEP 7 パーソナライズ：シーン選択

いくつかの聞こえの質問がありますので回答してください。イヤチップを耳に一番フィットするサイズに付け替えてください

送信したデータを元に設定データをお届けします